

# AirBridge®

Medizintechnik der neuesten Generation

## Das wasserdichte Duschpflaster 100 Stück



- Ohne Wundauflage
- Reduziert Wundinfektionsgefahr durch Nässe
- Aus hautverträglichen und umweltfreundlichen Materialien
- Leicht anzulegen, einfach abziehbar
- Hält Wunde und Wundverband sicher trocken
- PVC- und lösungsmittelfrei
- Erhältlich in 3 Größen: S, M, L

Größe  
**M**

Format: 16 x 20,4 cm / Abgedeckter, nicht klebender Wundbereich: 10 x 14 cm

Bitte die Gebrauchsanleitung auf der Rückseite beachten

Hergestellt für  
discountmed Medizintechnik, Rilkeweg 3, 93128 Regenstauf, Germany  
Tel. +49 (0) 9402-5042160, Fax +49 (0) 9402-5042162, info@discountmed.de

[www.discountmed.de](http://www.discountmed.de)

PZN 9155224

# AirBridge®

Bedienungsanleitung Duschpflaster

1 An der Anfassflasche das Pflaster ca. 1 cm anheben.



2 Das Pflaster, beginnend an der Anfassflasche faltenfrei vor der Wunde (oder dem Wundverband) anlegen. Dann die Trägerfolie des Pflasters langsam über die Wunde abziehen, so dass das Pflaster komplett aufliegt. Achten Sie darauf, dass klebende Stellen nur auf der Haut zum liegen kommen.



3 Jetzt nur noch mit der Hand glattstreichen und gefahrlos duschen.



Hergestellt für  
discountmed Medizintechnik, Rilkeweg 3, 93128 Regenstauf, Germany  
Tel. +49 (0) 9402-5042160, Fax +49 (0) 9402-5042162, info@discountmed.de

[www.discountmed.de](http://www.discountmed.de)