

AirBridge

Medizintechnik der neuesten Generation

Das wasserdichte Duschpflaster

100 Stück



- Reduziert Wundinfektionsgefahr durch Nässe
- Aus hautverträglichen und umweltfreundlichen Materialien
- Leicht anzulegen, einfach abziehbar
- Hält Wunde und Wundverband sicher trocken
- PVC- und lösungsmittelfrei
- Erhältlich in 3 Größen: S, M, L

Größe

S

Format: 12,8 x 18,3 cm / Abgedeckter Wundbereich: 12,3 x 7,2 cm

Bitte die Gebrauchsanleitung auf der Rückseite beachten

Hergestellt für
discountmed Medizintechnik, Rilkeweg 3, 93128 Regensburg, Germany
Tel. +49 (0) 9402-5042160, Fax +49 (0) 9402-5042162, info@discountmed.de

www.discountmed.de

PZN 9155247

AirBridge

Bedienungsanleitung Duschpflaster

- 1 An der Anfasslasche das Pflaster ca. 1 cm anheben.



- 2 Das Pflaster, beginnend an der Anfasslasche, faltenfrei vor der Wunde (oder dem Wundverband) anlegen. Dann die Trägerfolie des Pflasters langsam über die Wunde abziehen, so dass das Pflaster komplett aufliegt. Achten Sie darauf, dass klebende Stellen nur auf der Haut zum Liegen kommen.



- 3 Jetzt nur noch mit der Hand glattstreichen und gefahrlos duschen.



2

Hergestellt für
discountmed Medizintechnik, Rilkeweg 3, 93128 Regensburg, Germany
Tel. +49 (0) 9402-5042160 Fax +49 (0) 9402-5042162 info@discountmed.de

www.discountmed.de